

医04 整形用品  
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

# サージバブル

再使用禁止

禁忌・禁止

再使用禁止

## 【形状・構造及び原理等】



パッケージ



展開した状態



清潔な空気を送った状態

### 原理

ポップアップフレームと送気コントロールモジュール (HEPA フィルター内蔵) を組み合わせて使用する。

外部から外科切開部位や術野を隔離することによって清潔な空間を作る。

## 【使用目的又は効果】

最小スペースで、外部の汚染から、外科切開部位などの手術部位を隔離し感染を予防するために使用する。

## 【使用方法】

- ポップアップフレームを円形に連結する。
- サージバブルを傷病者の上に展開する。
- ポップアップフレームとサージバブルを組み立てる。
- サージバブルと送気コントロールモジュールと接続する。
- 送気コントロールモジュールから清潔な空気を送る。

## 【使用上の注意】

- 包装の破損や製品の異常が認められた場合は使用しないこと。
- 本品は単回使用であり、再使用・再滅菌はしないこと。
- 高温を発する器具類に接しないように注意すること。
- 粘着テープを剥がす際は、皮膚からゆっくり剥がすこと。
- 使用後は医療用廃棄物として適切に処理すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

- 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
- 有効期限:パッケージに表示

## 【主要文献及び文献請求先】

請求先: アコードインターナショナル株式会社

## 【製造販売業者の名称及び住所】

製造販売業者:アコードインターナショナル株式会社  
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F  
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736  
製造業者:サージボックス社  
SurgiBox Inc  
(アメリカ・マサチューセッツ州)