

医04 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ 35531000

サージフィールド キット

再使用禁止

禁忌・禁止

- ・【使用目的又は効果】に記載した使用以外の目的には使用しないこと。
- ・再使用禁止（サージバブルのみ）

【形状・構造及び原理等】

本品は、サージバブル（ドレープ）、ポップアップフレーム、送気コントロールモジュール（HEPA フィルター内蔵）を組み合わせる使用とする。

原理

組み立てたドレープ内に清潔な空気を送ることによって、外科切開部位や術野を外部から隔離する。

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 直射日光及び高温多湿を避け室温にて保管
- ・ 有効期限:パッケージに表示

【使用目的又は効果】

最小スペースで、外部の汚染から、外科切開部位などの手術部位を隔離し感染を予防するために使用する。

【主要文献及び文献請求先】

請求先: アコードインターナショナル株式会社

【使用方法】

1. ポップアップフレームを円形に連結する。
2. サージバブルを傷病者の上に展開する。
3. ポップアップフレームとサージバブルを組み立てる。
4. サージバブルと送気コントロールモジュールを接続する。
5. 送気コントロールモジュールから清潔な空気を送る。

【製造販売業者の名称及び住所】

製造販売業者:アコードインターナショナル株式会社
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F
TEL: 03-5810-1735 FAX: 03-5810-1736
製造業者:サージボックス社
SurgiBox Inc
(アメリカ・マサチューセッツ州)

【使用上の注意】

1. 包装の破損や製品の異常が認められた場合は使用しないこと。
2. 高温を発する器具類に接しないように注意すること。
3. 粘着テープを剥がす際は、皮膚からゆっくり剥がすこと。
4. 使用後は医療用廃棄物として適切に処理すること。
5. 各製品の使い方に則り、使用すること。
6. 単回使用は、サージバブルのみ。