

機械器具 29 電気手術器
管理医療機器 バイポーラ電極 70655000

ジアテルミー用バイポーラ鑷子

【形状・構造及び原理等】

形状例：AU-TR3230



＜作動・動作原理＞

ジアテルミー本体高周波（13.56MHz）の発熱作用により鑷子電極間で生体組織を焼灼する。

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は眼科手術において、焼灼器本体（高周波電流発生装置）に接続して患部の凝固に用いる器具である。

【使用方法等】

- ①焼灼器本体（高周波電流発生装置）の電源スイッチがOFFになっていることを確認する。
- ②本品を電極用ハンドルに装着し、出力端子に接続する。
- ③電源スイッチをONにする。

④出力コントローラで出力を設定し、フットスイッチを踏み込むと本品先端に高周波電流が流れる。

なお、焼灼器の取り扱いについては、焼灼器本体の取扱説明書を参照すること。

【使用上の注意】

焼灼器本体の使用説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

直射日光、塵芥、高温、多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

洗浄および滅菌方法については、焼灼器本体の取扱説明書を参照すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造業者＞

MIRA, Inc.

アメリカ マイラ社

取扱説明書を必ずご参照下さい。



製造販売業者

アールイーメディカル株式会社

RE MEDICAL, Inc.

本 社：

〒540-0011 大阪市中央区農人橋 2 丁目 1 番 29 号

TEL (06)-4794-8220 (代表)