

機械器具 29 電気手術器
管理医療機器 バイポーラ電極 70655000

バイポーラ電極ペンシルタイプ

【禁忌・禁止】

- ・ 未滅菌品なので必ず決められた滅菌処理を施した後、使用してください。
- ・ 本品はバイポーラ端子専用のコードであり、モノポーラ端子には接続しないこと。[誤って本コードをモノポーラ出力端子に接続すると、予期せぬ出力電力が発生し、重篤な有害事象を引き起こす可能性がある。] ※

【形状、構造及び原理等】

- 14-7000 バイポーラ電極ペンシルタイプ 18G ストレート
- 14-7002 バイポーラ電極ペンシルタイプ 18G カーブ
- 14-7006 バイポーラ電極ペンシルタイプ 20G ストレート
- 14-7008 バイポーラ電極ペンシルタイプ 23G
ストレートテーパチップ
- 14-7009 リューザブル バイポーラ電極ペンシルタイプ 23G
テーパ鈍先
- 14-7010 リューザブル バイポーラ電極ペンシルタイプ 18G
30° アングルワイドストローク 双凝固型

【使用目的又は効能】

＜使用目的＞

眼科において、患部組織の凝固に用いる。

【使用方法等】

高周波発生装置に電極コードを用いて接続し、その装置本体の出力制御のもと、患部を凝固する。

洗浄・殺菌・滅菌について

＜洗浄＞

1. 使用後すぐに蒸留水・イオン交換水で十分にすすぐ。
2. 柔らかい毛の洗浄用ブラシと酵素洗浄剤を用いてペンシルの表面を手洗いする。

3. 手洗いの後、洗剤が残らないよう、表面を蒸留水・イオン交換水で十分に洗い流す。
4. 洗浄液や残り屑が無くなったら、滅菌済ペーパーなどを使って十分に乾燥させる。

＜滅菌＞

オートクレーブ滅菌

	温度（℃）	時間（分）
重力置換式	132	30
プレバキューム式	132	4

【保管方法及び有効期間等】

- ・ 水のかからない場所に保管、設置すること。
- ・ 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などのない安定した場所に保管、設置すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する恐れのない場所に設置すること。
- ・ 気圧、温度、湿度、風通し、日光、埃、塩分イオウ分などを含んだ空気などにより、本品に悪影響の生じる恐れのない場所に保管、設置すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 本品は必ず定期点検を行なうこと。
- ・ しばらく使用しなかったときは、使用前に必ず正常かつ安全に動作することを確認すること。
- ・ 保守や修理は、弊社サービスマンに依頼すること。
- ・ 本品は、使用者自身で絶対に分解、改造しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造業者＞

Kirwan Surgical Products LLC

アメリカ カーワン社

取扱説明書を必ずご参照下さい。



製造販売業者
アールイーメディカル株式会社
RE MEDICAL, Inc.
本 社：
〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋 2 丁目 1 番 29 号
TEL (06)-4794-8220 (代表)