

機械器具 29 電気手術器

管理医療機器 バイポーラ電極 70655000

## ディスプレイザブル バイポーラ電極 ペンシルタイプ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・本品はディスプレイザブル製品なので、1 回使用のみで、絶対に再使用しないこと。
- ・本品はバイポーラ端子専用のコードであり、モノポーラ端子には接続しないこと。[誤って本コードをモノポーラ出力端子に接続すると、予期せぬ出力電力が発生し、重篤な有害事象を引き起こす可能性がある。]

#### 【形状、構造及び原理等】

裏面参照

ニッケル、ステンレス

#### 【使用目的又は効果】

各科において、患部組織の凝固に用いる。

#### 【使用方法等】

1. 本品の包装を無菌的に開封する。
2. 本品を高周波電流発生装置に電極コードを用いて接続する。
3. 装置本体の出力制御のもと、患部組織を凝固する。

#### 【使用上の注意】

- ・本製品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。正常に作動しない場合、異常を発見した場合には使用しないこと。

- ・電極部（シャフト）の構造は細く繊細なため、使用中に繰り返してシャフトを曲げたり、過度の力でシャフトを曲げたりしないこと。[シャフトが破損する可能性がある]

#### 【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・直射日光・高温・多湿・塵芥を避けて保管すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する恐れのない場所に設置すること。

<使用期間>

本品の包装に別途記載。

#### 【保守・点検に係る事項】

- ・包装に破損や穴が見つかったとき、また使用の直前以外に開封されていたときは、絶対に本品を使用しないこと。
- ・本品は使用者自身で絶対に分解・改造しないこと。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造業者>

Kirwan Surgical Products LLC アメリカ カーワン社

製造販売業者 **アールイーメディカル株式会社**

RE MEDICAL, Inc.



本 社：〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋 2 丁目 1 番 29 号

TEL (06)-4794-8220(代表)

14-5000 ディスポーザブルバイポーラ電極 ペンシルタイプ 18G ストレート



14-5002 ディスポーザブルバイポーラ電極 ペンシルタイプ 18G カーブ



14-5004 ディスポーザブルバイポーラ電極 ペンシルタイプ 20G ストレート



14-5006 ディスポーザブルバイポーラ電極 ペンシルタイプ 23G ストレート テーパーチップ



14-5009 ディスポーザブル バイポーラ電極 ペンシルタイプ 23G テーパー鈍先



14-5010 ディスポーザブル バイポーラ電極 ペンシルタイプ 18G 30° アングルワイドストローク 双凝固型



14-5011 ディスポーザブル バイポーラ電極 ペンシルタイプ 25G (直)



14-5007 ディスポーザブル バイポーラ電極 ペンシルタイプ 23G (直)

