

機械器具 29 電気手術器
管理医療機器 バイポーラ電極 70655000

バイポーラピンセット・ニッケル

【禁忌・禁止】

- ・ 未滅菌品なので必ず洗浄・滅菌処理を施した後、使用してください。
- ・ 本品はバイポーラ端子専用のコードであり、モノポーラ端子には接続しないこと。[誤って本コードをモノポーラ出力端子に接続すると、予期せぬ出力電力が発生し、重篤な有害事象を引き起こす可能性がある。]

【形状、構造及び原理等】

- 16-1080 リューザブル ジュエラス バイポーラピンセット TPR アイリス用(曲) 0.4mm
16-1090 リューザブル バイポーラピンセット接合型 0.4mm
16-3000 リューザブル ジュエラス バイポーラピンセットアイリス用(直) 0.4mm

【使用目的又は効果】

眼科において、患部組織の凝固に用いる。

【使用方法等】

高周波発生装置に電極コードを用いて接続し、その装置本体の出力制御のもと、患部を凝固する。

洗浄・殺菌・滅菌について

＜洗浄＞

1. 使用後すぐに蒸留水・イオン交換水で十分にすすぐ。
2. 柔らかい毛の洗浄用ブラシと酵素洗浄剤を用いてペンシルの表面を手洗する。
3. 手洗いの後、洗剤が残らないよう、表面を蒸留水・イオン交換水で十分に洗い流す。
4. 洗浄液や残り屑が無くなったら、滅菌済ペーパーなどを使って十分に乾燥させる。

＜滅菌＞

オートクレーブ滅菌

	温度（℃）	時間（分）
重力置換式	132	30
プレバキューム式	132	4

【使用上の注意】

- 1) 使用（滅菌）前に、汚れ、傷、曲がり、先端の損傷、可部の動き等に異常がないか点検すること。
- 2) 使用目的（手術・処置などの医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

- ・ 直射日光・高温・多湿・塵芥を避けて保管すること。
- ・ 化学薬品の保管場所やガスの発生する恐れのない場所に設置すること。

＜有効期間＞

本品の包装に別途記載。

【保守・点検に係る事項】

- ・ 包装に破損や穴が見つかったとき、また使用の直前以外に開封されていたときは、絶対に本品を使用しないこと。
- ・ 本品は使用者自身で絶対に分解・改造しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造業者＞

Kirwan Surgical Products LLC
アメリカ カーワン社

取扱説明書を必ずご参照下さい。



製造販売業者

アールイーメディカル株式会社

RE MEDICAL, Inc.

本 社：

〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋 2 丁目 1 番 29 号

TEL (06)-4794-8220(代表)