

機械器具38 医療用鉤
一般医療機器 鉤 JMDNコード：35105000

鉤 セントマークス型直腸鉤

【警告】

- ・本製品は未滅菌品である。
必ず滅菌を施してから使用すること。

【禁忌・禁止】

本製品を曲げ、切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）をすることは、折損等の原因となるので絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】*

1. 形状（代表例）



2. 原材料

ステンレス

3. 動作原理*

先端の鉤を術野に入れ、ハンドルを操作することにより、臓器等を牽引することができる。

【使用目的又は効果】*

手術時に臓器、組織等を拵げ、術野を確保するために使用する。

【使用方法等】*

1. 本品は未滅菌のため、下記標準条件に基づいて高圧蒸気滅菌又はEOG滅菌を施した上で用いる。再使用の場合も同様とする。

A. エチレンオキシドガス滅菌標準条件

使用ガス	酸化エチレン	20%
	炭酸ガス	80%
圧力	1.0±0.2kg/cm ²	
温度	60±5℃	
湿度	70±10%RH	
時間	4時間以上	
エアレーション	20分間の排気及び2時間の無菌チャージを行う。	

B. 高圧蒸気滅菌標準条件

温度	121℃
圧力	1.0kg/cm ²
時間	20分間

2. 使用前に【保守・点検に係る事項】を参照して点検を行う。
3. 使用目的に合わせて使用する。
4. 使用後は水洗いにて付着物を十分に落とし、洗浄、滅菌を行い、清潔な場所に保管し再使用に備えるものとする。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

- ・使用前に必ず洗浄・滅菌（保守・点検に係る事項参照）をすること。
- ・使用目的（手術・処置等の医療行為）以外の目的で使用しないこと。また、折損、曲がり等の原因になり得るので、
- ・使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。

- ・使用後は、付着している血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等に浸漬すること。
- ・塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因となるので、できるだけ使用を避けること。使用中に付着したときには水洗いすること。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・貯蔵・保管にあたっては、洗浄・消毒をした後、腐食を防ぐために保管期間の長短に関わらず必ず乾燥させること。
- ・高温多湿、直射日光及び水濡れを避け、風通しの良い清潔な場所に保管すること。
- ・傾斜、振動、衝撃（運搬時も含む）などの安定状態に注意すること。
- ・化学薬品の保管場所やガスが発生する場所には保管しないこと。
- ・滅菌済みのものを保管する際には、再汚染を防ぐために清潔な場所に保管するとともに、施設で設定した有効保管期間に従って管理すること。

2. 耐用期間

保管環境、使用頻度によって使用期限は異なるため使用者の判断による。

【保守・点検に係る事項】

1. 使用後は、できるだけ早く血液、体液、組織等の汚物を除去し、職業感染防止のために消毒をすること。
2. 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。
3. 洗剤の残留がないよう十分なすすぎをすること。仕上げすぎには、浄化水（濾過、蒸留、脱イオン化等）を用いること。
4. 洗浄後は、腐食防止の為に、直ちに乾燥させること。
5. 使用前に、汚れ、傷、曲がり等に異常がないか点検すること。

【製造販売者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売者

株式会社荒川製作所
〒120-0013
東京都足立区弘道1丁目3番26号
TEL 03-5888-6855
FAX 03-5888-6880

製造業者

株式会社荒川製作所