



* 1 0 9 - 0 2 6 *

2017 年 11 月（第 1 版）

届出番号 13B1X00062SPC010

医療用品 04 整形用品
一般医療機器 X線造影材入りスポンジ（JMDN:13705000）

メドライン ラップスポンジ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. 体内に留置しないこと
4. 電気メス等を近づけないこと。[引火するおそれがある]

【形状・構造及び原理等】

1. 本品は、綿 100% のガーゼと X 線造影材入りの柄（ヒモ）を縫製した製品である。
2. 機能に影響を与えない範囲で、形状の変更が行われる場合がある。
3. 本品は単回使用医療機器である。

【使用目的又は効果】

本品は、出血の抑制、液の吸収、擦過傷、乾燥又は汚染からの器官の保護のため、外科切開口、他の皮膚創傷又は内部構造に適用することを目的とする、X 線で検知可能な成分を含有する器具である。

【使用方法等】

本品はディスプレイ製品であるので、1 回限りの使用のみで再使用できない。

1. 滅菌包装より無菌的に取り出し、適宜使用する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 開封後は早めに使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：水濡れに注意し、直射日光、オゾン、紫外線、熱源、X 線、高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

メドライン・ジャパン合同会社

電話：(03) 5842-8800