



2022年9月（第1版）

届出番号 13B1X00062SPC014

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 X線造影系入りガーゼ（JMDN: 32374000）

# メドライン X線造影系入り医療ガーゼ

再使用禁止

## 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止
3. X線造影系部分を直接挟んで使用しないこと。〔切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがあるため。〕
4. X線造影系に電気メス等を近づけないこと。〔切断又は引火するおそれがあるため。〕
5. 体内に留置しないこと。〔体内遺残のおそれがあるため。〕

## 【形状・構造及び原理等】

1. 概要  
綿100%のガーゼにX線造影系を織り込んだものである。
2. 原材料  
本体: 綿  
青色X線造影系: 硫酸バリウム、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、青色着色剤  
黒色X線造影系: 硫酸バリウム、ポリ塩化ビニル、テレフタル酸ジオクチル、黒色着色剤

## 【使用目的又は効果】

本品は、出血の抑制、液の吸収、又は擦過傷、乾燥若しくは汚染からの器官の保護を目的として、身体内部又は外科切開部に用いる綿製の薬品を含まない吸収材料である。X線で検知できる成分を含む。

## 【使用方法等】

1. 適宜使用すること。

## 【使用上の注意】

1. X線撮影において撮影体位や角度により陰影が不明瞭な場合がある。
2. 本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、直ちに使用すること。

## 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件: 水濡れに注意し、直射日光、紫外線、熱源、高温多湿を避けて保管すること。
2. 有効期間: 本品の使用期限は包装に記載。〔自己認証（自社データ）による〕

## 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:  
メドライン・ジャパン合同会社  
電話: (03)5842-8800