



2025年 5月 (第1版)

届出番号 13B1X00062SPC017

医療用品 4 整形用品
一般医療機器 単回使用汎用サージカルドレープ (JMDN コード:35531000)

メドライン インサイズドレープ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

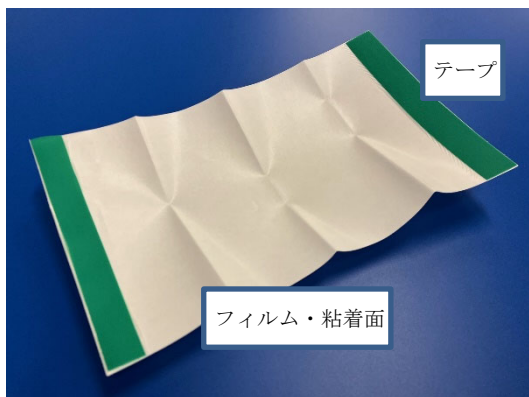

原材料

本体：ポリウレタン、ポリエチレン、アクリル系重合体

2. 原理

手術部位に貼付することにより、手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離し、術中の感染を予防する。

【使用目的又は効果】

本品は、手術室やカテーテル処置室の汚染（器具やテーブルの上）から外科切開部位や術野を隔離するために、保護的なカバー又は障壁として用いる。

【使用方法等】

1. 本品を無菌的に取り出し、適応する部位を消毒し十分に乾燥させたあと、本品を適切な位置に固定して展開する。
2. 本品を剥がす際は、皮膚から180度の角度でゆっくり剥がす。フィルムを折り返し、その角度を保ちながら皮膚から引き離す。剥がす際、フィルムが大きく伸びるのを防ぐため、フィルムを確実に掴むこと。

【使用上の注意】

使用注意

- 1) 発疹、発赤、かゆみ等や浸出液の貯留による浸軟、皮膚剥離等の症状が現れた場合は直ちに使用を中止し、適切な治療を施すこと。
- 2) アルコールを含む消毒剤等が本品のテープ部分に付着しないように注意すること。（本品の染料が溶け出し皮膚に付着する可能性がある）

重要な基本的注意

- 1) 複数の患者には使用しないこと。
- 2) 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- 3) このパッケージの内容物は火や高温に近づけると溶解したり燃えることがある。ドレープはその使用目的からバリアの機能を有するので、患者に塗布したアルコールが気化し内部にこもることによって引火しやすくなることもある。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：水濡れに注意し、直射日光、オゾン及び高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証(自社データ)による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

メドライン・ジャパン合同会社

電話 (03) 5842-8800