

医療用品 04 整形用品  
一般医療機器 コットンボール（JMDN：11028000）

## メドライン コットンボール

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 体内に留置しないこと

#### 【形状・構造及び原理等】

本品は、綿 100%の脱脂綿であり、球状の塊である。様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる。

#### 【使用目的又は効果】

本品は、様々な身体部位に薬物を塗布したり、又は液を除去するために用いる綿繊維の球状の塊である。

#### 【使用方法等】

1. 衛生材料として適宜滅菌する。
2. 滅菌方法はエチレンオキシドガス滅菌を推奨する。
3. 使用目的に応じ、適宜使用する。

#### ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 体内に残らないように使用すること。
2. 本品をほどいて使用しないこと。

#### 【使用上の注意】

##### ＜重要な基本的注意＞

使用前に本品に不具合が無いことを確認し、異常がある場合は、使用しないこと。

#### 【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：

水濡れに注意し、直射日光、オゾン、紫外線、熱源、X線、高温多湿をさけて保管すること。

有効期間：

本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

メドライン・ジャパン合同会社

電話（03）5842-8800