



* 1 0 3 - 0 1 4 C *

2017年9月（第4版）新記載要領に基づく改訂
*2014年4月（第3版）

届出番号 13B1X00062STH002

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 吸引チューブ (JMDN:16779000)


メドライン サクションチューブ（未滅菌）

再使用禁止

【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

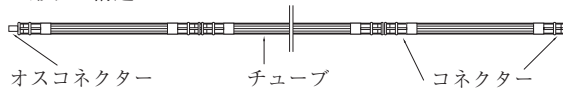

チューブ：ポリ塩化ビニル
コネクター：ポリ塩化ビニル
オスコネクター：ポリプロピレン

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

2. 原理

吸引器等に接続することによって吸引する。

【使用目的又は効果】


吸引器等との接続に用いる柔軟性のある未滅菌のチューブである。

【使用方法等】

本品はディスプレイ製品であるので、1回限りの使用のみで再使用できない。
包装より取り出し、必要な長さにカットして、吸引器等の接続口に接続する。
必要に応じて滅菌する。滅菌する場合は必ずエチレンオキサイドガス滅菌で行うこと。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1. 必要な長さにカットする場合は、コネクターの中央部を切断すること。

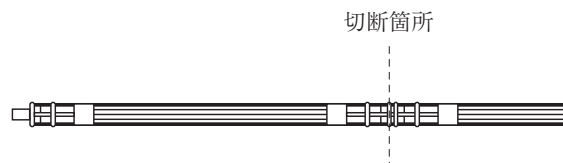

2. 接続部から液漏れ等の異常が認められた場合は使用しないこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 滅菌する場合は必ずエチレンオキサイドガス滅菌で行うこと。
2. 複数の患者には使用しないこと。
3. 包装を開封したら、速やかに使用すること。
4. 本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと。

＜その他の注意＞

本品を吸引器等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：水濡れに注意し、直射日光、オゾン及び高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

【*製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者：

メドライン・ジャパン合同会社

〒112-0002 東京都文京区小石川1-4-1

電話：(03) 5842-8800