

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管
 一般医療機器 吸引チューブ (JMDN : 16779000)

メドライン サクションチューブ（未滅菌） （バブルチューブ）

再使用禁止


【禁忌・禁止】
 再使用禁止

<その他の注意>

本品を吸引器等に接続するとき、ゆるみがないことを確認し、確実に接続すること。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

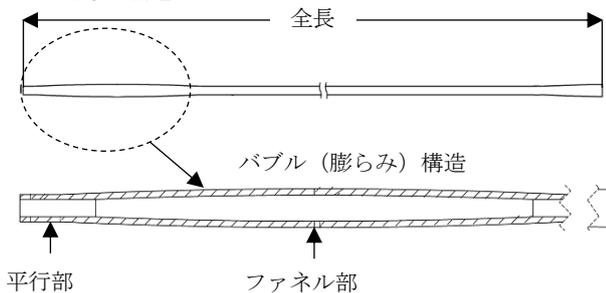

本品は、95cm間隔でバブル（膨らみ）構造を繰り返す。

チューブ：ポリ塩化ビニル

本品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

（単位：mm）

| 全長 | ファネル部 | | 平行部 | |
|-------|-------|-----|-----|-----|
| | 外径 | 内径 | 外径 | 内径 |
| 30480 | 13.5 | 9.2 | 9.5 | 6.1 |

2. 原理

吸引器等に接続することによって吸引する。

【使用目的又は効果】

吸引器等との接続に用いる柔軟性のある未滅菌のチューブである。

【使用方法等】

本品は Disposable 製品であるので、1 回限りの使用のみで再使用できない。

包装より取り出し、必要な長さにカットして、吸引器等の接続口に接続する。

未滅菌品のため、体外での延長以外には使用しないこと。

<使用方法等に関連する使用上の注意>

1. 接続部の異常が認められた場合は使用しないこと。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 複数の患者には使用しないこと。
- 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- 本品を折り曲げた状態、引っ張った状態で使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管の条件：水濡れに注意し、直射日光、オゾン及び高温多湿を避けて保管すること。

有効期間：本品の使用期限は包装に記載。[自己認証（自社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

メドライン・ジャパン合同会社

〒112-0002 東京都文京区小石川1-4-1

電話：(03) 5842-8800