

器具器械(12)理学診療用器具
一般医療機器 弾性ストッキング JMDN コード：31724000

ベノトレイン

単回使用

【警告】

- ・本品の使用前に、この添付文書の全てを熟読すること。
- ・現在治療中の疾患において、医師による相談が必要と思われる場合は、担当医師に相談の上使用すること。

【形状・構造及び原理等】

本品「ベノトレイン」は、脚の血行障害による疲れ、むくみ、静脈瘤などを予防し治療するためのものです。

本品は、医療用圧迫ストッキングとしてドイツ RAL 規格で認定され、また、「Öko-Tex スタンダード 100」を受けておりますので、安心してご着用いただけます。

【使用目的、効能又は効果】

四肢の静脈血、リンパ液うっ滞を軽減又は予防する等、静脈環流の促進を目的に使用されます。

【品目仕様等】


本品は、医療用圧迫ストッキングとしてドイツ GGG (品質保証連合) で認定され、安全性が保証されているものです。

【操作方法、使用方法等】

①ストッキングの装着法

本品は、起きてすぐに着用してください。そのとき脚は乾いた状態であるようにしてください。軽くパウダーをつけることをお勧めします。

1. ストッキングをたぐり、つま先まで手を入れたら、土踏まずの部分で裏返します。
2. つま先からかかとまではきます。
*かかとから切りかえ部分が90°になるように合わせてください。
3. 指先から自然と布地を逃がすような感じにしながら、足首から膝上まで引き上げます。
*ふくらはぎ側を少し強めに引き上げ、膝の裏側で布地を上下させてフィット感を調節してください。
4. 膝上から太もも、脚の付け根の順に引き上げます。
*側面から太ももの裏側を強めに引き上げてください。
この時脚の付け根、股下の位置がぴったりするよう調節してください。
5. 脚の付け根から腹部まではきます。
*脚の付け根からヒップラインにかけて手を上下させ、フィット感を調節してください。

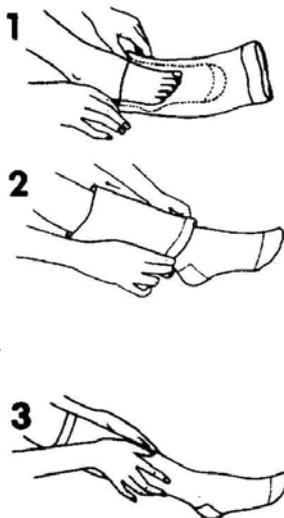

着脱の際は、ゴム手袋を使用することをお勧めします。

②スリーブ及びグローブの装着は、腕又は手指に合わせて装着してください

【使用上の注意】

1. 現在治療中の疾患において、医師による相談が必要と思われる場合は、担当医師に相談の上ご使用ください。
2. 長時間座位を続ける場合は、血流が停滞する恐れがありますので十分注意してください。またその場合は着用を避けてください。
3. かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合は、即座に使用を中止してください。
4. 強い温感または冷感、つま先のしびれ、圧迫による強い違和感がある場合には、使用をお止めください。
5. サイズを測定しないまま着用するのはお止めください。
6. 肌の敏感な方にレースボーダー付(シリコンゴム)は、希に皮膚が赤くなることがありますのでご注意ください。

【包装】

1着/箱

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：アイエヌティー株式会社

**製造販売業者住所：東京都練馬区早宮 1-41-7

**電話番号：03-5999-0240

**FAX 番号：03-5946-9045

製造業者：Bauerfeind AG (パウアーファインド社)

製造業者住所：Triebseser Straße 16, D-07937 Zeulenroda,
Germany