

機械器具 43 医療用つち
一般医療機器 つち (11947010)
アルタピン用マレット

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



| |
|------------|
| 商品コード |
| M5100.0100 |

2. 原材料

ステンレススチール
ポリアセタール樹脂

【使用目的又は効果】**

本品は、歯科用インプラントの外科手術に用いる器具で、アルタピン用ホルダーを使用してアルタピンを装着する際に使用する。

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- (1) アルタピン用ホルダー(※a)を使用してアルタピン(※b)を患部に配置する。
- (2) アルタピン用ホルダー(直)(※a)を使用する場合に、本品で軽く槌打する。
- (3) アルタピン(※b)を患部に固定する。

2. 滅菌方法

附着物を洗浄・除去した後、通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。
ただし、オートクレーブによる加熱温度は160℃を超えないこと。

3. 併用医療機器(※)

| | 販売名 | 承認/届出番号 |
|---|------------|------------------|
| a | アルタピン用ホルダー | 27B1X00027000033 |
| b | アルタピン | 22000BZY00027000 |

[使用方法等に関連する使用上の注意] *

- ・ 本品は非滅菌であるため、使用前には必要に応じて洗浄・消毒もしくは滅菌すること。
- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- ・ 使用後は付着している血液・組織などが乾燥しないように直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- ・ 強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH (アルタテック GmbH)
ドイツ