

**歯科材料 09 歯科用研削材料**  
一般医療機器 歯科用研削器材 (70908000)

## ジルコン2°

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造


- (1) ジルコン2° ブルー スーパーコース  
(ブルーリング)



- (2) ジルコン2° レッド コース  
(レッドリング)




- (3) ジルコン2° イエロー ミディアム  
(イエローリング)

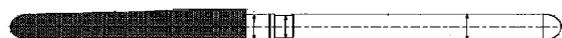

- (4) ジルコン2° オレンジ ファイン  
(オレンジリング)



- (5) ジルコン2° ピンク スーパーファイン  
(ピンクリング)

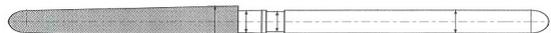

- (6) ジルコン2° (セット)  
ジルコン2° セットは、(1)～(5)を組み合わせた6本のセットである。

名称	商品コード
ジルコン2° ブルー スーパーコース	537580
ジルコン2° レッド コース	537540
ジルコン2° イエロー ミディアム	537515
ジルコン2° オレンジ ファイン	537508
ジルコン2° ピンク スーパーファイン	537504
ジルコン2° セット	200115

#### 2. 原材料

シャフト (軸部)	ステンレススチール
研削部	工業用ダイヤモンド

### 【使用目的又は効果】\*\*

本品は、補綴物の研削に用いる。

### 【使用方法等】

#### 1. 使用方法

- (1) ジルコン2° を用途に合わせて選択し、技工用回転研削器具等に取り付ける。
- (2) 研削する箇所本品を当て、技工用回転研削器具等を操作し、必要に応じて研削する。
- (3) 使用後は、技工用回転研削器具等から本品を取り外し所定の場所に保管する。

[使用方法等に関連する使用上の注意] \*

- ・ 推奨回転数にて使用すること。
- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント  
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31  
電話 06-6377-2221

製造業者： DFS-DIAMON GmbH(ディーエフエス-ダイヤモンド GmbH)  
ドイツ