


歯科材料 09 歯科用研削材料
 一般医療機器 歯科用研削器材 (70908000)
クラウンカッター ソフティ


【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

- (1)クラウンカッター ソフティ CA用(S)
 (2)クラウンカッター ソフティ CA用(L)

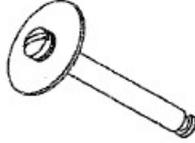

- (3)クラウンカッター ソフティ HP用(S)
 (4)クラウンカッター ソフティ HP用(L)

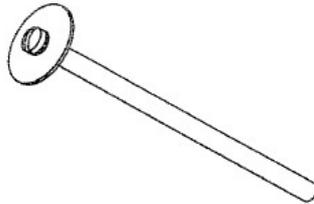

商品コード	
(1)	51143
(2)	51141
(3)	50143
(4)	50141

2. 原材料

軸部	ステンレススチール
防塵ホイル	シリコン
研削部	ステンレススチール
	工業用ダイヤモンド

【使用目的又は効果】**

本品は、補綴物等の研削に用いる。

【使用方法等】*

1. 使用方法

- (1) 本品を技工用回転研削器具又は歯科用回転研削器等に取り付ける。
- (2) ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入する。
- (3) 研削する箇所に本品を当て、技工用回転研削器具又は歯科用回転研削器等を操作し、必要に応じて研削する。
- (4) 使用後は、技工用回転研削器具又は歯科用回転研削器等から本品を取り外し所定の場所に保管する。

[使用方法等に関連する使用上の注意] *

- ・ 推奨回転数にて使用すること。
- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
 大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
 電話 06-6377-2221

製造業者： DFS-DIAMON GmbH(ディーエフエス-ダイヤモンド GmbH)
 ドイツ