

** 2017 年 9 月(第 4 版)
* 2017 年 9 月(第 3 版)


届出番号 27B1X00027000071

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 (70744000)

ダイアデュールスターカーバイド

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

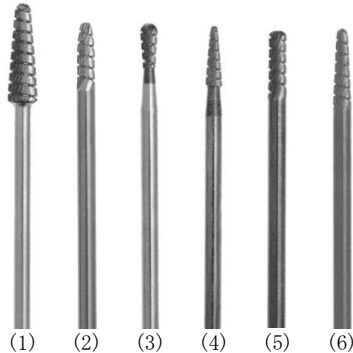

	商品コード
(1)	700801
(2)	702602
(3)	704602
(4)	704802
(5)	702402
(6)	702202

2. 原材料

ヘッド部分	タングステンカーバイド鋼
シャンク部分	ステンレススチール

【使用目的又は効果】**

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認する。
- (2) 回転数 15000－30000rpm で使用する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕*

- ・ 推奨回転数にて使用すること。
- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： DFS-DIAMON GmbH(ディーエフエスダイアモン GmbH)
ドイツ