


歯科材料 09 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 (70744000)

ダイヤモンドデュールチターノカーバイド

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

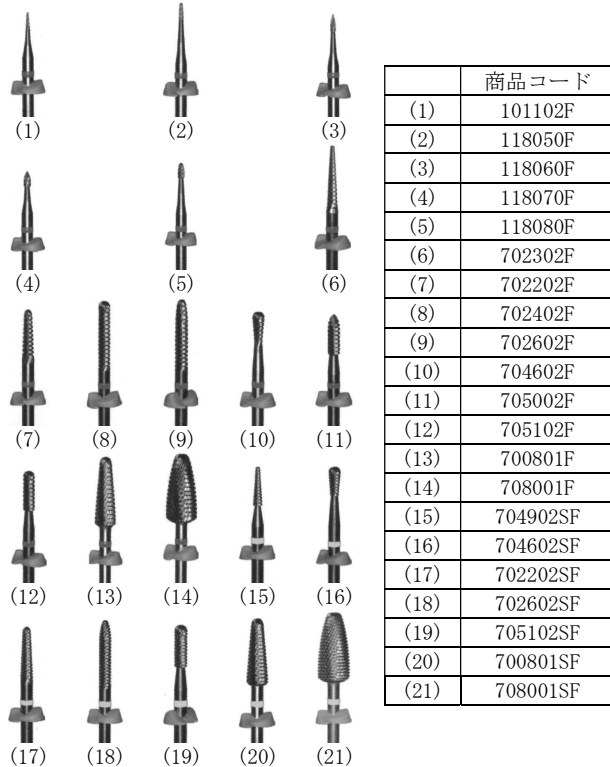

2. 原材料

ヘッド部分	タングステンカーバイド鋼
シャンク部分	ステンレススチール

【使用目的又は効果】**

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

- ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認する。
- 回転数 15000－30000rpm で使用する。

[使用方法等に関連する使用上の注意] *

- 推奨回転数にて使用すること。
- 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： DFS-DIAMON GmbH (ディーエフエス-ダイヤモンド GmbH) ドイツ