

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 (70907000)

ユボフィックス

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

- (1) ユボフィックスO
- (2) ユボフィックスII



商品コード	
(1)	802207
(2)	802227

2. 原材料

ホイール部分	微細ダイヤモンド粒子含浸ケブラー樹脂
マンドレル部分	ステンレススチール

【使用目的又は効果】**

補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】

使用方法

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認する。
- (2) 回転数は3000-5000rpmで使用する。

[使用方法等に関連する使用上の注意] *

- ・ 推奨回転数にて使用すること。
- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221製造業者： DFS-DIAMON GmbH(ディーエフエス-ダイヤモンド GmbH)
ドイツ