

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)

インプラントアナログ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】*

1. 形状・構造



1) インプラントアナログ K-シリーズ

サイズ	商品コード
3.3	K3010. 3300
3.8	K3010. 3800
4.3	K3010. 4300
5.0	K3010. 5000
6.0	K3010. 6000



2) コーンログインプラントアナログ

サイズ	商品コード
3.3	C3010. 3300
3.8	C3010. 3800
4.3	C3010. 4300
5.0	C3010. 5000



3) カムログ デジタルインプラントアナログ

サイズ	商品コード
3.3	K3025. 3300
3.8	K3025. 3800
4.3	K3025. 4300
5.0	K3025. 5000
6.0	K3025. 6000



4) コーンログ デジタルインプラントアナログ

サイズ	商品コード
3.3	C3025. 3300
3.8	C3025. 3800
4.3	C3025. 4300
5.0	C3025. 5000



5) デジタル バーラボアナログ

サイズ	商品コード
3.3-4.3	J3025. 4300
5.0-6.0	J3025. 6000

本品は、フィクスチャ(※)及びアバットメント(※)の口腔内状況を模型上に再現するために用いる。

※ カムログインプラント K-シリーズ(22200BZX00868000)
コーンログ インプラントシステム(22900BZX00154000)
バーアバットメント
(23000BZX00079000/23000BZX00080000)

2. 原材料

- 1)～4) : チタン合金
5) : ステンレススチール

【使用目的又は効果】**

本品は、歯科技工用の器具・材料で、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】**

1. 使用方法

《インプラントアナログ K-シリーズ / コーンログインプラントアナログ》

- 適切なインプレッションポスト(※a)を用いて、インプラントレベルで印象採得する。
- インプレッションポストに、種類・径の対応した本品を接続する。この際、インプレッションポストのカムがきっちりと本品のカム溝に収まり、確実に接続されていることを確認する。
- 印象材で採得した印象に、②のインプレッションポストを挿入する。
- 石膏で模型を製作する。本品は口腔内のフィクスチャの位置を再現する。

《カムログ デジタルインプラントアナログ / コーンログ デジタルインプラントアナログ》

- デジタル印象を採得し、プリンティングにより模型を作製する。
- デジタルインプラントアナログハンドル(※b)を用いて本品を模型に装着する。本品は口腔内のフィクスチャの位置を再現する。

《デジタル バーラボアナログ》

- デジタル印象を採得し、プリンティングにより模型を作製する。
- ブリッジ用アバットメント着脱ツール(※c)を用いて本品を模型に装着する。本品は口腔内のアバットメントの位置を再現する。

2. 併用医療機器(※)

	販売名	届出番号
a	インプレッションポスト	27B1X00027000069
b	カムログ インプラント補綴	27B1X00027000026
c	用器具	

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 過剰な外圧をかけたりしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)
ドイツ