

機械器具 43 医療用つち  
一般医療機器 つち (11947010)

マレット

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



商品コード
J5300.0100

2. 原材料

ステンレススチール

【使用目的又は効果】\*\*

本品は、ハンドル、軸及びヘッドからなる器具であり、歯科診療において槌打が必要な場合に本品で槌打する。

【使用方法等】\*\*

1. 使用方法

ハンドル部を確実に把持し、使用目的に適した力によりヘッド部を確実に目的物に当てるように使用する。本品は医療用つちであり、医科及び歯科診療に使用する。

2. 滅菌方法

付着物を洗浄・除去した後、通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。ただし、オートクレーブによる加熱温度は160℃を超えないこと。

[使用方法等に関連する使用上の注意]\*

- ・ 本品は非滅菌であるため、使用前には必要に応じて洗浄・消毒もしくは滅菌すること。
- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- ・ 使用後は付着している血液・組織などが乾燥しないように直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- ・ 強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント  
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31  
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)  
ドイツ