

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)

ボールアタッチメント用ラボアナログ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



型式	商品コード
3.3	J3015.3300
3.8	J3015.3800
4.3	J3015.4300
5.0	J3015.5000

2. 原材料

ボールアタッチメント用ラボアナログ：合金

スタビライザー：POM

【使用目的又は効果】**

本品は、歯科技工用の器具・材料で、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

- (1) 通法に従い、印象採得する。
- (2) 印象材が硬化してから、印象を口腔内よりはずす。
- (3) ラボアナログを印象の陰型に装着し、マスターモデルを作製する。
- (4) フィメールを安定させるためスタビライザーをラボアナログのヘッド部に装着する。
- (5) ラボアナログのヘッド部にフィメールを装着する。
- (6) 通法に従い、フィメールをデンチャーに取り込む。

[使用方法等に関連する使用上の注意] *

- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH(アルタテック GmbH)
ドイツ