

機械器具 58 整形用機械器具

一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)

バリオ SR 技工用器材

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

[使用方法等に関連する使用上の注意] *

- ・折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は以下で構成される。

(1) バリオ SR アナログ



型式	商品コード
3.8-4.3	J2567.4300
5.0-6.0	J2567.6000

(2) バリオ SR プラスチックコーピング



	種類	型式	商品コード
A	ブリッジ用	3.8-4.3	J2563.4301
		5.0-6.0	J2563.6001
B	ストレートクラウン用	3.8-4.3	J2563.4302
		5.0-6.0	J2563.6002
C	アングルクラウン用	3.8-4.3	J2563.4303
		5.0-6.0	J2563.6003

2. 原材料

- (1) バリオ SR アナログ : チタン合金
- (2) バリオ SR プラスチックコーピング : POM

【使用目的又は効果】

歯科技工用の器具・材料として歯科インプラントの上部構造を製作するために用いる。

【使用方法等】

1. 使用方法

(1) バリオ SR アナログ

- ① 通法のとおり印象採得をし、インプレッションポスト(※)の径に合った本品を連結する。
- ② 石膏により模型を製作する。本品は口腔内のアパットメントの位置を再現する。

(2) バリオ SR プラスチックコーピング

- ① 本品の単冠修復焼却用(B もしくは C。回転防止機構付き)又はブリッジおよびバー修復用(A。回転防止機構なし)を適切に選択する。
- ② 直接ワックスアップし、通法による鑄造テクニックを用いて補綴修復物を作製する。

2. 併用医療機器(※)

販売名	届出番号
バリオ SR インプレッションキャップ	27B1X00027000099