

機械器具 42 医療用剥離子

一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 (70683000)

ティッシュコントロールセット

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、以下の 5 種類の医療機器で構成される。

構成品の一部もしくは全部を、接続することなく組み合わせて製造販売するほか、単品で製造販売することがある。

組合せて販売する場合

商品コード	名称
79BTIHI	ティッシュコントロールセット

(1) ティッシュコントロールインスツルメント No. 1



商品コード
HI020

(2) ティッシュコントロールインスツルメント No. 2



商品コード
HI021

(3) ティッシュコントロールインスツルメント No. 3



商品コード
HI022

(4) ティッシュコントロールインスツルメント No. 4



商品コード
HI023

(5) ティッシュコントロールインスツルメント No. 5



商品コード
HI024

2. 原材料

スチール

【使用目的又は効果】*

口腔内手術で骨膜、粘膜等の組織の剥離用いる手動の器具である。

【使用方法等】

1. 使用方法

- ① 使用する部位によって、適切な形状の本品を選択する。
- ② 本品を使用して、歯周軟組織の剥離を行う。

2. 滅菌方法

付着物を洗浄・除去した後、通法に従ってオートクレーブにより滅菌を行う。

ただし、オートクレーブによる加熱温度は 160℃を超えないこと。

[使用方法等に関連する使用上の注意]**

- ・ 本品は非滅菌であるため、使用前には必要に応じて洗浄・消毒もしくは滅菌すること。
- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。
- ・ 術中は患者の全身のおよび口腔内の状態を監視し、異常が認められた場合は治療の中止等を含め、患者の安全を確保すること。
- ・ 使用後は付着している血液・組織などが乾燥しないように直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- ・ 強アルカリ・強酸性の洗浄液又は消毒液は、本品を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。
- ・ 術後の定期的な診査を行い、必要に応じて適切な処置を講ずること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Hager & Meisinger GmbH
(ハーガー&マイジンガー GmbH)
ドイツ