


歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 (70908000)

ダイアデュール 23R バー

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

ヘッド部の形状の異なる 4 種類で構成される。

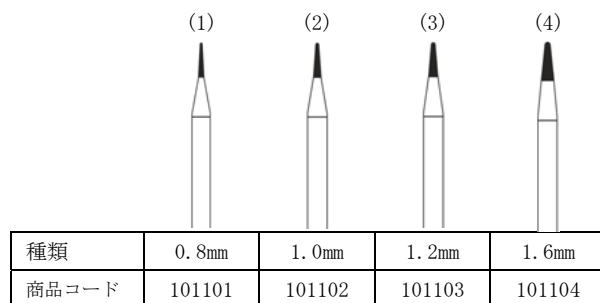

2. 原材料

ヘッド部：カーバイド鋼

シャンク部：ステンレススチール

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工において補綴物等を研削するために用いる器具である。

【使用方法等】

使用方法

- ① 適切な形状のものを選択する。
 - ② 技工用ハンドピースに取り付けて、推奨回転数で使用する。
- 推奨回転数：15000-30000rpm

[使用方法等に関連する使用上の注意] **

- ・ 推奨回転数にて使用すること。
- ・ 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： DFS-DIAMON GmbH (ディーエフエス・ダイヤモンド GmbH)
ドイツ