

歯科材料(09) 歯科用研削材料

一般医療機器 歯科技工用カーバイド切削器具 (70744000)


ダイヤデュール ターボカーバイド

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品は、タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具である。

商品コード：559001

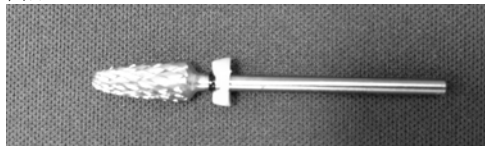

2. 原材料

ヘッド部	タングステンカーバイド鋼
シャンク部	ステンレスチール

【使用目的又は効果】

タングステンカーバイド製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するために用いる研削器具をいう。

【使用方法等】

1. 使用方法

- (1) ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認する。
- (2) 回転数 15000～25000rpm で使用する。

[使用方法に関連する使用上の注意] *

- (1) 推奨回転数にて使用すること。
- (2) 折損、変形などの原因になるため必要以上の力を加えないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： DFS-DIAMON GmbH (デーイーエフエス・ター・イアモン GmbH)
ドイツ