

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 (70757000)

再使用禁止

COMFOUR 技工用器材

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる
歯科技工用の器具・材料である。

1. 形状・構造

(1) クラウン用プラスチックスリーブ



商品コード
J2256. 4306
J2256. 6006

(2) 鋳造用プラスチックスリーブ



商品コード
J2257. 4301
J2257. 6001

(3) パッシブフィット用プラスチックスリーブ



商品コード
J2261. 4301
J2261. 6001

2. 原材料

(1)	クラウン用プラスチックスリーブ	ポリオキシ メチレン
(2)	鋳造用プラスチックスリーブ	
(3)	パッシブフィット用プラスチックス リーブ	
	付属スクリュー	チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製する際に用いる技
工用の器具である。

【使用方法等】*

(1) クラウン用プラスチックスリーブ

(2) 鋳造用プラスチックスリーブ

- 模型上のラボアナログ (※a) にプラスチックスリーブをラ
ボ補綴スクリュー (※b) で固定する。
- 通法どおりワックスアップして補綴物を作製する。
- 仕上げた補綴物をバーアバットメント (※c) に補綴スク
リュー (※d) で固定する。

(3) パッシブフィット用プラスチックスリーブ

- 模型上のラボアナログ (※a) にパッシブフィットチタンベ
ース (※e) を装着し、その上にプラスチックスリーブを付属
スクリューで固定する。
- 通法どおりワックスアップして補綴物を作製する。
- 仕上げた補綴物をバーアバットメント (※c) に補綴スク
リュー (※d) で固定する。

※併用医療機器

	販売名	届出番号
a	カムログ インプラント補綴器具	27B1X00027000026
b	COMFOUR 補綴器具	27B1X00027000156
c	カムログ COMFOUR アバットメント	23000BZX00079000
	コーンログ COMFOUR アバットメント	23000BZX00080000
d	カムログ COMFOUR アバットメント	23000BZX00079000
e	カムログアバットメント	21200BZY00583000

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売者： 株式会社アルタデント
大阪府大阪市北区芝田 2-8-31
電話 06-6377-2221

製造業者： Altatec GmbH (アルタテック GmbH)
ドイツ