

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 70901000

アイデント カーボランダムポイント 2 8

【形状・構造及び原理等】

形状：シリカを主成分とする研削材を焼結した軸付き砥石
軸部：鋼製 HP 用 直径 2.3 mm φ

* * 【使用目的、効能又は効果】

- ① 使用目的、用途
歯科技工用エンジンにセットし、陶材、コバルトクロム金属、
貴金属、硬質レジン等の歯科補綴物の研削に用いる器材である。

* * 【使用方法等】

歯科用電気エンジン、マイクロモーターなどに装着して使用
する。
この場合ハンドピースメーカーの取り扱い説明書に基づいて
確実にセットしてください。

《注意》

- (1) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクに確実に
(2)
おくまで挿入し半チャックでないことを確認すること。
(3) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
(3) 頭部の細いもの、長いもの、大きい形状のものは折れるこ
とがあるので無理な角度や過度の加圧での使用は避けるこ
と。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 本品の取り付けには、十分に留意し確実に取り付けること。
② 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局
所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し粉
塵を吸入しないこと。
③ 研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護めがねを
使用すること。
④ 使用回転数は低速を厳守すること。
⑤ 使用前に予備回転を行い振れがないことを確認する。
⑥ けがをすることがあるので、無理な角度、過度の圧力での使
用は避けること。
⑦ 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

* * 【使用上の注意】

- 1) 重要な基本的注意

- * * ① 指定の最高許容回転数を超えて使用しないこと

最高許容回転数
30,000 回転/分

- * * ②変形、損傷（錆、表面傷、曲がり、汚損）等のある物は
使用しないこと。

【保管方法および有効期間等】

【保管方法】

- ① 水分、腐食性薬剤およびその蒸気の暴露を避けて、外圧（物
理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理するこ
と。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元： 有限会社 アイデント化学工業
住所： 〒567-0035
大阪府茨木市見付山 1- 2- 24
電話番号： 072-626-0418