

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

ウルトラバフH2-L（レーズ用）

【形状・構造及び原理等】

形状：

円形のバフ状

成分：

材質 天然繊維を成分とするバフ

寸法 直径 80 mm

厚さ 約 10 mm

【使用目的又は効果】

(1) 性能、効能又は効果

本バフは、金属床のキズ取りから最終仕上げ研磨に使用する。
当社研磨材 ウルトラマルチ、又はウルトラマルチスーパー
ファインと共に使用すると相乗的な効果を得られる。

(2) 使用目的、用途

主として、金属床のキズ取り仕上げに使用する。
本品をレーズにセットし、ウルトラマルチスーパーファインや
ウルトラマルチを付着させ、金属表面のキズ取りから最終仕
上げに用いる。

【使用方法等】

(1) レーズへのセット

通法によってレーズへセットしてください。
この場合レーズメーカーの取り扱い説明書に基づいて確実に
セットしてください。

(2) 金属床のキズ取り、仕上げ研磨

ウルトラマルチスーパーファインやウルトラマルチハイパー
エックスと併用いたしますと、簡単にスピーディに美しい光沢
が得られます。

(3) 本品は、繊維を固く圧縮しております。

固いバフであり、研磨は危険を伴います。

初心者は使用しないでください。

レーズ研磨時は回転速度を下げ、このバフの特性を理解の
上研磨してください。

又、固いバフであり、研磨対象物をしっかり手で保持しはね飛
ばされないよう十分に注意して使用してください。

当社のバフは日本で丁寧に製造されております。類似のバフと
の違いをお確かめください。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

* * ① 指定の最高許容回転数を超えて使用しないこと

最高許容回転数
5,000 回転/分

2) 基本的注意事項

(1) 本品の取り付けには、十分に留意し確実に取り付けること。

(2) 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所
吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵
を吸入しないこと。

(3) 研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護めがねを使
用すること。

(4) 使用回転数は低速を厳守すること。

(5) 使用前に予備回転を行い振れがないことを確認する。

(6) けがをすることがあるので、無理な角度、過度の圧力での使用
は避けること。

(7) 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

(8) 本製品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法および有効期間等】

[保管方法]

① 水分、腐食性薬剤およびその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理
的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

有効期間は特に定めませんが、変形、効力の低下等があれば使用
しないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 有限会社 アイデント化学工業

住所 〒567-0035

大阪府茨木市見付山1-2-2 4

電話番号 072-626-0418