

歯科材料 09 歯科用研削材料
歯科用研磨器材 70907000

ウルトラバフG3 UZU

【形状・構造及び原理等】

形状：

円形のバフ

成分：

材質 化学繊維を成分とする布

寸法 直径 2.5 cm

厚さ 約3 mm

【使用目的又は効果】

化学繊維からなる布製バフ。

このバフは、歯科技工士、歯科医師が研磨技術のレベルに関係なく簡単に、速くきれいにできることを目的にしている。

① 性能、効能又は効果

金属の場合は、当社ウルトラマルチスーパーファインやウルトラマルチハイパーエックスを付着させ使用するとより表面を平坦にさせ輝きも得られます。

② 使用目的、用途

金属補綴物の場合、ウルトラマルチスーパーファインやウルトラマルチハイパーエックスを付着させ、ロビンソンブラシの要領で使用するとキズ取り効果と素晴らしい光沢が得られません。

【使用方法等】

① マンドレールへのセット

通法によってマンドレールへセットしてください。

② ハンドピースに装着

この場合ハンドピースメーカーの取り扱い説明書に従って確実にセットしてください。

③ 金属の粗・中・仕上げ研磨

ウルトラバフF1 PROにウルトラマルチスーパーファイン又はハイパーエックスと併用いたしますと、簡単に美しい光沢が迅速に得られます。

④備考

ウルトラバフG2、G3、G7と数字が大きくなるほどバフのコシが柔らかくなります。

更なる光沢をお求めの場合はウルトラバフG7とウルトラマルチスーパーファインをご使用ください。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

* * ① 指定の最高許容回転数を超えて使用しないこと

最高許容回転数
18,000 回転/分

② 変形等がある物は使用しないこと。

③ 本品の取り付けには、十分に留意し確実に取り付けること。

④ 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し粉塵を吸入しないこと。

⑤ 研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護メガネを使用すること。

⑥ 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法および有効期間等】

[保管方法]

① 水分、腐食性薬剤およびその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること

[有効期間]

有効期間は特に定めませんが、変形、効力の低下等があれば使用しないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 有限会社 アイデント化学工業

住所： 〒567-0035

大阪府茨木市見付山1-2-24

電話番号： 072-626-0418