

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

ウルトラバフ F1 PRO-L（レーズ用） 80

【形状・構造及び原理等】

形状：

円形のバフ

成分：

材質 化学繊維を成分とする布

寸法 直径 約 8 cm

厚さ 約 8 mm

【使用目的又は効果】

化学繊維からなる布製バフ。

このバフは、歯科技工士、歯科医師が研磨技術のレベルに関係なく簡単に、速くきれいにできることを目的にしている。

① 性能、効能又は効果

金属のキズ取りから仕上げに使用します。

金属は、当社ウルトラマルチスーパーファインやウルトラマルチハイパーエックスを付着させ使用するとキズ取りから仕上げまででき、より表面を平坦にさせ輝きも得られます。

② 使用目的、用途

金属補綴物の場合は、ウルトラマルチスーパーファインやウルトラマルチハイパーエックスを付着させますと素晴らしい光沢が得られます。

【操作方法又は使用方法等】

① レーズへの装着

通法によってレーズへセットしてください。

この場合メーカーの取り扱い説明書に従って確

実にセットしてください。

② このバフは最初に使用するときは、毛出しが必要です。

使用回数が増すにしたがって最適な柔らかさと表面の状態になります。（研磨材の油分とで馴染んでいきます。）

③ 金属の研磨

1. 金属の粗から中研磨、仕上げ研磨

ウルトラバフ F1 PRO-L にウルトラマルチスーパーファイン又はハイパーエックスと併用いたしますと、簡単に美しい光沢が迅速に得られます。

2. 金属の仕上げ研磨

ウルトラバフ G2 UZU-L とウルトラマルチスーパーファインを併用しますと、簡単に美しい光沢が迅速に得られます。

④ 備考

ウルトラバフシリーズは G2、G3、G7 と数字が大きくなるほどバフのコシが柔らかくなります。更なる光沢をお求めの場合はウルトラバフ G3 又は G7 とウルトラマルチスーパーブライトをご使用ください。

【使用上の注意】

1) 重要な基本的注意

* * ① 指定の最高許容回転数を超えて使用しないこと

最高許容回転数
5,000 回転/分

2) 基本的注意事項

① 本品の取り付けには、十分に留意し確実に取り付けること。

② 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。

③ 研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護メガネを使用すること。

④ 使用回転数は低速を厳守すること。

⑤ 使用前に予備回転を行い振れがないことを確認する。

⑥ けがをすることがあるので、無理な角度、過度の圧力での使用は避けること。

⑦ 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

⑧ 本製品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法および有効期間等】

〔保管方法〕

① 水分、腐食性薬剤およびその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。

② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

有効期間は特に定めませんが、変形、効力の低下等があれば使用しないこと。

【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元： 有限会社 アイデント化学工業

住所： 〒567-0035

大阪府茨木市見付山 1- 2- 24

電話番号： 072-626-0418