

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
ウルトラバフ F 1 PRO-L（レーズ用） 6 5

【形状・構造及び原理等】

形状：

円形のバフ

成分：

材質 化学繊維を成分とする布

寸法 直径 約 6.5 cm

厚さ 約 4 mm

【使用目的、効能又は効果】

化学繊維からなる布製バフ。

このバフは、歯科技工士、歯科医師が研磨技術のレベルに関係なく簡単に、速くきれいにできることを目的にしている。

① 性能、効能又は効果

レジン系樹脂や金属のキズ取りから仕上げに使用します。
レジン系樹脂の場合は当社ウルトラマルチハイブリッドを付着させながら使用するとデンチャー樹脂部等のキズを取り、輝きも得られます。
金属の場合は、当社ウルトラマルチスーパーファインやウルトラマルチハイパーエックスを付着させ使用するとキズ取りから仕上げまででき、より表面を平坦にさせ輝きも得られます。

② 使用目的、用途

金属補綴物の場合は、ウルトラマルチスーパーファインやウルトラマルチハイパーエックスを付着させ、ロビンソンプラシンの要領で使用すると素晴らしい光沢が得られます。

ハイブリッドレジン、コンポジットレジン、スルホン、アクリルレジン等の樹脂系補綴物の場合は、本品を技工用レーズにセットし、ウルトラマルチハイブリッドを付着させながら低速回転で研磨し樹脂部表面のキズを取り、素速く表面を滑らかにさせます。

【品目仕様等】

当該品目の含有する基材は、生物学的に安全な材料を使用し、且つ研磨性能を最大に発揮する成分を使用する事を設計仕様とする

【操作方法又は使用方法等】

① レーズへの装着

通法によってレーズへセットしてください。
この場合メーカーの取り扱い説明書に従って確実にセットしてください。

② このバフは最初に使用するときは、毛出しが必要です。使用回数が増すにしたがって最適な柔らかさと表面の状態になります。（研磨材の油分とで馴染んでいきます。）

③ 樹脂系の研磨

1. 樹脂系の粗から中研磨

〔ハイブリッドレジン、スルホン、アクリルレジン等〕
形態修整後、ウルトラバフ F 1 PRO-L にウルトラマルチハイブリッドを適量付着させ研磨対象物を研磨します。
使用回転数は焼き付かせない程度の低速で研磨します。

2. 樹脂系の仕上げ研磨

〔ハイブリッドレジン、スルホン、アクリルレジン等〕
ウルトラバフ G 2 UZU-L とウルトラマルチスーパーファインを併用しますと、簡単に美しい光沢が迅速に得られます。

④ 金属の研磨

1. 金属の粗から中研磨、仕上げ研磨

ウルトラバフ F 1 PRO-L にウルトラマルチスーパーファイン又はハイパーエックスと併用いたしますと、簡単に美しい光沢が迅速に得られます。

2. 金属の仕上げ研磨

ウルトラバフ G 2 UZU-L とウルトラマルチスーパーファインを併用しますと、簡単に美しい光沢が迅速に得られます。

⑤ 備考

ウルトラバフシリーズは G 2、G 3、G 5 と数字が大きくなるほどバフの
コシが柔らかくなります。更なる光沢をお求めの場合はウルトラバフ G 3 又は G 5（但しハンドピース用）とウルトラマルチスーパーブライトをご使用ください。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- ① 本品の取り付けには、充分に留意し確実に取り付けること。
- ② 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ③ 研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護メガネを使用すること。
- ④ 使用回転数は低速を厳守すること。
- ⑤ 使用前に予備回転を行い振れがないことを確認する。
- ⑥ けがをすることがあるので、無理な角度、過度の圧力での使用は避けること。
- ⑦ 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。

【使用上の注意】

- ① 本材は、記載の用途以外には使用しないこと。
- ② 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法および使用期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ① 水分、腐食性薬剤およびその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

内容量：1 枚/袋

【主要文献及び文献請求先】

請求先： 有限会社 アイデント化学工業
住所： 〒567-0035
大阪府茨木市見付山 1- 2- 24
電話番号： 072-626-0418

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元： 有限会社 アイデント化学工業
住所： 〒567-0035
大阪府茨木市見付山 1- 2- 24
電話番号： 072-626-0418