

歯科材料9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
スプリントフィニッシャー用バフ

【形状・構造及び原理等】

形状：

円形のバフ

成分：

材質 化学繊維を成分とする布

寸法 直径 2.5 cm

厚さ 約3 mm

【使用目的又は効果】

化学繊維からなる布製バフ。

このバフは、歯科技工士、歯科医師が研磨技術のレベルに関係なく簡単に、速くきれいにできることを目的にしている。

- ① 性能、効能又は効果
レジン系樹脂、特にナイロン系樹脂（ソフトデンチャー）の仕上げに使用します。
- ② 使用目的、用途
本品は、補綴物等の研磨に用いる器材である。

【使用方法等】

1) 使用前の準備

- ・作業部、軸（本申請対象外）に異常がないか確認すること。

2) 使用中の操作

- ・歯科用ハンドピースに装着して回転させ、対象物に作業部をあて研磨する。

【使用上の注意】

- ① 本製品の取り付けには、十分に留意し確実に取り付けること。
- ② 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ③ 研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護メガネを使用すること。
- ④ 使用回転数は低速を厳守すること。
- ⑤ 使用前に予備回転を行い振れがないことを確認する。
- ⑥ けがをすることがあるので、無理な角度、過度の圧力での使用は避けること。
- ⑦ 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑧ 本製品は、記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑨ 本製品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ① 水分、腐食性薬剤およびその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者： 有限会社 アイデント化学工業
電話番号： 072-626-0418

販売業者： 株式会社 スマートプラクティス ジャパン
電話番号： 0120-415-418