

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000
セレクトライトレジンプロペースト

【形状・構造及び原理等】

形状：

容器 円柱状、固形

成分：

アルミナ、植物油脂、その他の油脂

【使用目的又は効果】

アルミナ砥粒、及び特殊油脂からなる歯科用研磨材。

① 性能、効能又は効果

本研磨材は、光沢のでにくいナイロン系ソフト樹脂)、等の補綴物の最終研磨光沢仕上げに使用できる。本研磨材の主成分アルミナ砥粒は高硬度、最微細の原料であり、キズを取りながら最終光沢仕上げまで行えます。歯科補綴物研磨を目的にした、バランスの良い研磨材を目的としている。

② 使用目的、用途

弾性レジン、アクリルレジン床、ナイトガード、歯列矯正用の装置及び咬合スプリント等の仕上げ研磨に用いる研磨材料

③本品は水溶性であり温水等で簡単に洗浄できます。

【使用方法等】

- 1) 少量の本剤をロビンソンブラシ等、研磨用パフに塗付する。
- 2) 軽い圧力及び短いインターバルで研磨を繰り返す。

洗浄

作業終了後、通法により洗浄してください。

【使用上の注意】

- ① 本材が目に入らないように注意すること。保護めがねを使用すること。
万一目に入った場合には、こすらずに直ちに水で十分洗い流して下さい。
- ② 研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ③ 研磨作業を行う際には、目の損傷を防ぐために保護めがねを使用すること。
- ④ ブラシ、パフ等を使用する場合には、その説明書に記載されている使用上の注意事項を守ること。
- ⑤ 本製品は、説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥ 本製品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ① 水分、腐食性薬剤およびその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- ② 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

有効期間は特に定めないが、変形、効力の低下等があれば使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：有限会社 アイデント化学工業
電話番号：072-626-0418

販売業者：セレクト株式会社
住所：〒543-0011 大阪市天王寺区清水谷町 19-10
電話番号：06-6765-0691