

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000

## ミラーブリエ

### 【形状・構造及び原理等】

- (1) 形状・構造  
形状: ペースト状。  
主成分: ダイヤモンド、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、顔料
- (2) 原理  
研磨用のブラシやバフ、フェルトホイールなどに本品を塗布し、補綴物等を研磨する。

### 【使用目的又は効果】

コバルトクロム・ジルコニア・ポーセレン等の歯科補綴物の最終研磨に用いる。

### 【使用方法等】

- ① 研磨用のブラシやバフ、フェルトホイールなどに本品を塗布し、回転させながら、被研磨物に押し当てて研磨してください。艶が出るまで繰り返し研磨を行ってください。
- ② 研磨後は、水を用いて超音波洗浄を行ってください。

### 【使用上の注意】

- ① 本品を口腔内で使用しないこと。
- ② 本品が目に入らないように注意すること。万が一目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄をし、眼科医の診断を受けること。
- ③ 本品は酸化アルミニウムを含み、長期または反復暴露により、肺の障害を引き起こす可能性があるため、局所排気装置や公的機関が認定した防塵マスクなどの適切な対策を取ること。
- ④ 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状があらわれた場合は、使用を中止し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

本材は高温多湿、直射日光、火気を避け、室温で保管すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元・製造元  
株式会社アイディエス

### 【問い合わせ先】

**本社**  
住所 : 〒113-0033  
東京都文京区本郷3-5-4 朝日中山ビル7F  
電話番号 : 03-5840-9877  
FAX 番号 : 03-5840-9866

**大阪事業所**  
住所 : 〒564-0053  
大阪府吹田市江の木町30-34  
電話番号 : 06-6378-7711  
FAX 番号 : 06-6378-7712