

医療用品 4 整形用品  
一般医療機器 医療用不織布 34655000

## カルソケット止血パッド

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

##### ＜使用方法＞

1. 再使用禁止。[ディスポーザブル製品のため。]
2. 再滅菌禁止。[再滅菌を意図していないため。]
3. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。[品質が担保できないため。]
4. 記載の使用目的以外に使用しないこと。

#### 【形状、構造及び原理等】

##### ＜概要＞

本品は、創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材である。

本品は、滅菌済みであり単回使用である。



サイズ: 10x25mm

##### ＜原材料＞

アルギン酸カルシウム

#### 【使用目的又は効果】

本品は、創傷又は外科切開部を処置するために用いる不織布から成る被覆・保護材である。

#### 【使用方法等】

1. 包装より本品を取り出す。
2. 創傷又は外科切開部に本品を押し当てる。
3. 使用後は廃棄する。

本品は単回使用であり、再使用できない。

#### 【使用上の注意】

1. 使用者は、使用前に本品の外観を確認し、汚れ、損傷等の異常がないことを確認すること。
2. 使用者は、使用に際し、その手順について理解した上で使用すること。
3. 使用後は、感染性廃棄物として処理すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。
2. 有効期間  
容器または被包に明記の使用期限までに使用すること。

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### ＜製造販売業者＞

アライアンス・メディカル・グループ株式会社  
神奈川県川崎市麻生区百合丘一丁目2番地1  
電話 044-577-1584

##### ＜製造業者＞

Roosin Medical Co., Ltd. (中国)