

医療用品 4 整形用品  
一般医療機器 救急絆創膏  
JMDN コード : 34864000

添付文書番号:10038000019-01

## 穿刺部パッチ

再使用禁止

### 【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止〔ディスポーザブル製品のため〕
2. 再滅菌禁止〔再滅菌を意図していないため〕
3. 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと
4. 粘着剤に対して過敏症を起こす恐れのある場合は使用しない事  
〔アレルギー症状を起こすことがあるため〕
5. 記載の使用目的以外に使用しないこと

### 【保管方法及び有効期間】

1. 保管方法  
水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管する事。
2. 有効期間  
容器または被包に明記の使用期限までに使用する事。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

アライアンス・メディカル・グループ株式会社  
電話 (044)577-1584

〔製造業者〕

SHANDONG SUCCARE MEDICAL Co., LTD (中国)

### 【形状、構造及び原理】

#### 1. 形状、構造

本品はアルギン酸カルシウム製不織布でできたパッド部とパッド部を保持するための粘着テープ(アクリル系粘着剤)及び剥離紙から構成されている滅菌済粘着テープです。



サイズ: 4x4cm

《 外 観 》

#### 2. 原理

本品を貼付することにより対象部位を保護します。  
また、創傷や穿刺部からの浸出液、血液等をパッドが吸収し保護します。

### 【使用目的、又は効果】

- ・傷口または血管穿刺部位からの出血や浸出液を吸収・保持して被覆保護に用います。
- ・身体の創傷部位の被覆保護や支持等に用います。

### 【使用方法等】

1. 貼付前に穿刺部や創傷部およびその周辺を清潔にする。
2. 絆創膏中央のパッドを対象部位にあてがい貼付する。  
傷口から出血が認められる際はパッド部を適宜圧迫し止血する。
3. 処置が完了または貼付から24時間経過した際には本品を取り外し廃棄する。

本品は単回使用であり再使用できない。

### 【使用上の注意】

- ・本品は滅菌済みです。包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないでください。
- ・本品は単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないでください。
- ・本品は外皮専用です。体内に使用しないでください。
- ・再滅菌しないでください。
- ・本品使用中に過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談してください。
- ・使用後は医療廃棄物として、処理してください。