


ILM スパーテル

【禁忌・禁止】

- 改造しないこと。
- 本品に異常がある場合は使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

① ILM スパーテル

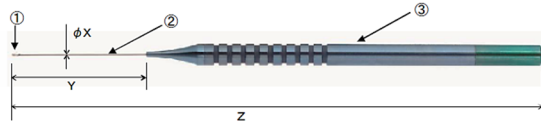


(先端部形状)



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2 3 G a	0.63mm	40mm	157mm
2 5 G a	0.5mm	28mm	145mm
2 7 G a	0.4mm	28mm	151mm

② ホリオ氏メンブレンスパテル

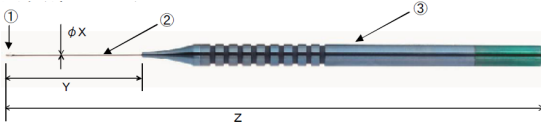


(先端部形状)



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2 5 G a	0.5mm	28mm	123mm

③ ホリグチ氏ディレクショナル・メンブレンナイフ

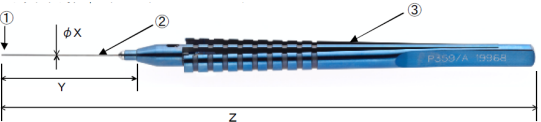

(先端部形状)



- ①先端部
- ②シャフト
- ③ハンドル

サイズ	X	Y	Z
2 5 G a	0.5mm	33mm	145mm

【使用目的又は効果】

眼科手術において眼組織の処置、物質の除去等を行うために用いる。

【使用方法等】

1. 滅菌方法

本製品はエチレンオキシドガス滅菌器又は高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）を用いて滅菌を行う。

滅菌条件等の詳細は、取扱説明書を参照のこと。

2. 使用方法

- ハンドルを持ち、先端部により眼組織の処置、物質の除去等を行う。
- 使用後は速やかに洗浄、消毒、滅菌を行う。
洗浄、消毒、滅菌の手順等の詳細は取扱説明書を参照のこと。

【使用上の注意】

- 使用前には外観上の損傷や動作不良がないことを確認すること。
- 包装から取り出す際、及び使用后、洗浄、消毒、滅菌時には先端部（刃先等）に十分注意して取り扱うこと。
- 使用するために必要な知識、技術に習熟した医師以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管すること。
- 直射日光や水漏れは避けるよう細心の注意を払うこと。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: ルミバードメディカルジャパン株式会社

TEL 03-5859-0470

製造所: Katena Products, Inc. (カテナ社)
(アメリカ合衆国)