

2012年11月1日

歯科材料 9 歯科用研削材料  
歯科用研磨器材 70907000

一般医療機器

## 綿バフ

### 【形状・構造及び原理等】

形状:円盤状  
直径:100mm  
25枚重ね



### 【使用目的】

補綴物等の研磨に用いる。

### 【操作方法、使用方法等】

歯科用レーズなどに装着して使用する。

### 【使用上の注意】

- ①レーズメーカーの指示に従って、バフの装着を確認すること。
- ②使用前に予備回転を行い、異常がないことを確認する。
- ③繊維の長いもの、大きい形状のものは、絡まったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ④指定(製品の被包に記載)の最高許容回転速度(回転数)を越えて使用しないこと。
- ⑤目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ⑥変形、損傷(繊維の長いもの、汚損)等のあるものは使用しないこと。
- ⑦本材は(性能、使用目的、効能または効果)の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑧本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。
- ⑨本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管管理すること。

### 【包装】

1枚単位で梱包

### 【製造販売業社及び製造業者の氏名又は住所等】

アルゴフアイルジヤパン株式会社

住 所:〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町3-4

T E L:03-3233-1133

F A X:03-3233-1129