

2013 年 1 月 10 日

2013 年 4 月 18 日 (第 2 版)

医療機器届出番号：13B2X10121000154

機械器具 70 歯科用鑄造機
歯科技工用ポーセレン焼成炉 35762000
一般医療機器
シントラ

(形状・構造および原理等)



(使用目的)

ポーセレン、ジルコニア等を焼成するために歯科技工で用いる。

(品目仕様等)

サイズ：37 x 43 x 75 c m

重量：60Kg

焼成チャンバー：φ95mm x 140mm/h

焼成テーブル：φ90mm

温度範囲：室温から 1,650℃まで

電源：100/120 ボルト AC50-60Hz

200/240 ボルト AC50-60Hz

最大電力消費量：15 ボルト x 100A=1,500 ワット

(操作方法、使用方法等)

半焼成のデンタルワークを取扱説明書に基づいて焼成する。

(使用上の注意)

- ① 付属の取扱説明書を必ず参照すること。
- ② 引火性のものや可燃性のものを近くに置かないこと。
- ③ 水のかかるような場所におかないこと。
- ④ 換気の良い場所に設置すること。
- ⑤ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないこと。
- ⑥ 電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに電源プラグを持って行うこと。
- ⑦ 煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生したときは、使用をやめること。

(貯蔵・保管方法および使用期間等)

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

(包装)

シントラユニット…1 台

電源コード…1 本

焼結るつぼ

焼結るつぼ用カバー

取扱説明書

リフトキー

ジルコニアビーズ

(製造販売業者および製造業者の氏名または住所)

アルゴファイルジャパン株式会社

住所：〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町 3-4 ニュー楓ビル

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

製造元：Shenpaz Dental Ltd

(イスラエル)

取扱説明書を必ず御参照ください。