

平成 28 年 1 月 21 日

医療機器届出番号：13B2X10121000158

歯科材料 9 歯科用研削材料

歯科用研削器材 70908000

一般医療機器

ジルコール

(形状・構造および原理等)



(貯蔵・保管方法および使用期間等)

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

(包装)

1 本入り ビニールパッケージで梱包。

(製造販売業者および製造業者の氏名または住所)

アルゴフアイルジャパン株式会社

住所：〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町 3-4 ニュー楓ビル

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

(使用目的)

補綴物等の研削に用いる

(操作方法、使用方法等)

歯科技工用電気マイクロモーターなどに装着して使用する。

(使用上の注意)

- ① ハンドピースメーカーの指示に従って、シャंकを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認する。
- ③ 頭部の細いもの、長いもの、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ④ 指定(製品の被包に記載)の最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しないこと。
- ⑤ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ⑥ 変形、損傷(錆、表面傷、曲がり、汚損)等のあるものは使用しないこと。
- ⑦ 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。

取扱説明書を必ず御参照ください。