

2016 年 1 月 20 日

医療機器届出番号：13B2X10121000159

2025 年 10 月 22 日（第 2 版）


歯科材料 9 歯科用研削材料

歯科用研削器材 70908000

一般医療機器

## イエローダイヤモンド

（形状・構造および原理等）

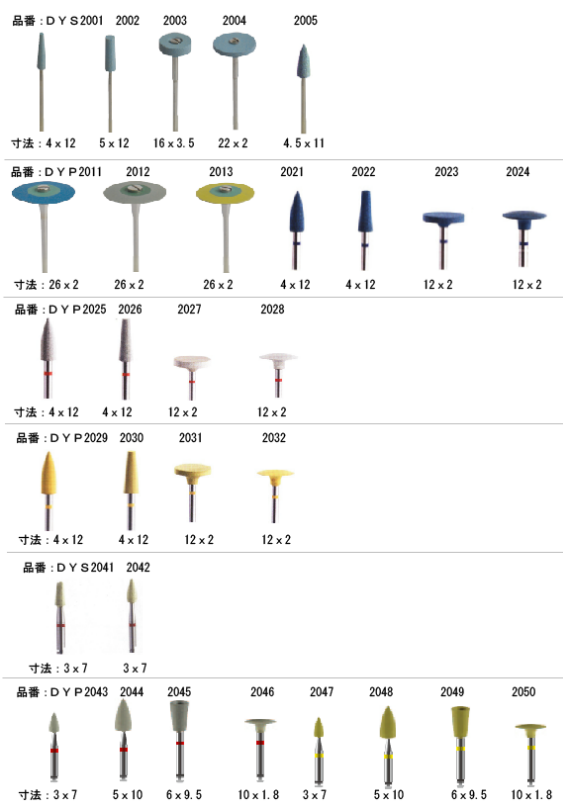

（使用目的）

補綴物等の研削に用いる

（操作方法、使用方法等）

歯科技工用電気マイクロモーターなどに装着して使用する。

（使用上の注意）

ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し半チャックでないことを確認すること。  
使用前に予備回転を行い、振れが無いことを確認する。  
頭部の細いもの、長いもの、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。

指定（製品の被包に記載）の最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しないこと。  
目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。  
変形、損傷（錆、表面傷、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。  
本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。

（貯蔵・保管方法および使用期間等）

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

（包装）

1 セット入り ビニールパッケージで梱包。

（製造販売業者および製造業者の氏名または住所）

アルゴファイルジャパン株式会社

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目 7 番地

錦町一丁目ビル 3 階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

取扱説明書を必ず御参照ください。