

2016 年 3 月 23 日

医療機器届出番号：13B2X10121000161

歯科材料 9 歯科用研削材料

歯科用研削器材 70908000

一般医療機器

ブレポリッシャーホイール（パワーポリッシャー）

（形状・構造および原理等）

形状：円盤状（許容誤差±10%）

種類	外径（mm）	厚さ（mm）
6522-R	22.0	3.0
6517-R	17.0	3.0
6522-L	22.0	3.0
ERP2071	20.0	7.0
ERP2051	22.0	3.0

（貯蔵・保管方法および使用期間等）

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

（包装）

10 枚入り 1 箱

100 枚入り 1 箱

（使用目的）

シリコンカーバイド等を用いる技工用研削材。

（操作方法、使用方法等）

歯科技工用電気マイクロモーターなどに装着して使用する。

（使用上の注意）

- ① ハンドピースメーカーの指示に従って、確実に機器へ装着しゆるんでないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、異常が無いことを確認する。
- ③ 中央部の壊れたもの、均一な形状でないものは、外れたりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ④ 指定（製品の被包に記載）の最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しないこと。
- ⑤ 目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
- ⑥ 変形、損傷（表面傷、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- ⑦ 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること

（製造販売業者および製造業者の氏名または住所）

アルゴフアイルジヤパン株式会社

住所：〒101-0053

東京都千代田区神田美土代町 3-4 ニュー楓ビル

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

取扱説明書を必ず御参照ください。