

2016 年 3 月 23 日

医療機器届出番号：13B2X10121000161

2025 年 10 月 22 日（第 2 版）

歯科材料 9 歯科用研削材料

歯科用研削器材 70908000

一般医療機器

プレポリッシャーホイール

(形状・構造および原理等)

形状：円盤状（許容誤差±10%）

種類	外径（mm）	厚さ（mm）
6522-R	22.0	3.0
6517-R	17.0	3.0
6522-L	22.0	3.0

(貯蔵・保管方法および使用期間等)

○ 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。

○ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

(包装)

100 枚入り 1 箱

(使用目的)

シリコンカーバイド等を用いる技工用研削材。

(操作方法、使用方法等)

歯科技工用電気マイクロモーターなどに装着して使用する。

(使用上の注意)

① ハンドピースメーカーの指示に従って、確実に機器へ装着しゆるんでないことを確認すること。

② 使用前に予備回転を行い、異常が無いことを確認する。

③ 中央部の壊れたもの、均一な形状でないものは、外れたりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。

④ 指定（製品の被包に記載）の最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しないこと。

⑤ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。

⑥ 変形、損傷（表面傷、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。

⑦ 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること

(製造販売業者および製造業者の氏名または住所)

アルゴフアイルジャパン株式会社

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目 7 番地

錦町一丁目ビル 3 階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

製造元：Kenda AG, Dental Manufacturing

(リヒテンシュタイン)

取扱説明書を必ず御参照ください。