

2016年3月23日

2025年10月22日(第2版)

2026年2月17日(第3版)

医療機器届出番号：13B2X10121000161

歯科材料 9 歯科用研削材料

歯科用研削器材 70908000

一般医療機器

プレポリリッシャーホイール

(形状・構造および原理等)

形状：円盤状(許容誤差±10%)

種類	外径(mm)	厚さ(mm)
6522-R	22.0	3.0
6517-R	17.0	3.0
6522-L	22.0	3.0

(使用目的)

シリコンカーバイド等を用いる技工用研削材。

(操作方法、使用方法等)

歯科技工用電気マイクロモーターなどに装着して使用する。

(使用上の注意)

- ① ハンドピースメーカーの指示に従って、確実に機器へ装着しゆるんでないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、異常が無いことを確認する。
- ③ 中央部の壊れたもの、均一な形状でないものは、外れたりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ④ 指定(製品の被包に記載)の最高許容回転速度(回転数)を超えて使用しないこと。
- ⑤ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ⑥ 変形、損傷(表面傷、曲がり、汚損)等のあるものは使用しないこと。
- ⑦ 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること

(貯蔵・保管方法および使用期間等)

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

(包装)

10枚入り1箱

100枚入り1箱

(製造販売業者および製造業者の氏名または住所)

アルゴフアイルジヤパン株式会社

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目7番地

錦町一丁目ビル3階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

製造元：Kenda AG, Dental Manufacturing

(リヒテンシュタイン)

取扱説明書を必ず御参照ください。