

平成 29 年 5 月 19 日

*2017 年 7 月 21 日（第 2 版）

医療機器届出番号：13B2X10121000163

歯科材料（09） 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

JDS ロビンソンブラシ

【形状・構造および原理等】

形状	入数	品番
φ 15 mm #9	12 本	JR9012
φ 18 mm #11	12 本	JR1112

最大回転数：15,000rpm

シャフト直径：2.35 mm

原理：歯科技工用電気マイクロモーター等に装着して使用する。

（保管方法および有効期間等）

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

（包装）

12 本入

（製造販売業者および製造業者の氏名または名称等）

アルゴフアイルジャパン株式会社

【使用目的、効果】

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。

【使用方法等】

歯科用ハンドピースに装着し回転させ、補綴物にブラシ部を当てて研磨する。（レーズには使用できない）

【使用上の注意】

- ① ハンドピースメーカーの指示に従って、確実に機器へ装着しゆるんでないことを確認すること。
- ② 使用前に予備回転を行い、異常が無いことを確認する。
- ③ 中央部の壊れたもの、均一な形状でないものは、外れたりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
- ④ 指定（製品の被包に記載）の最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しないこと。
- ⑤ 目の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ⑥ 変形、損傷（表面傷、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
- ⑦ 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。