

2017 年 5 月 19 日  
2017 年 7 月 24 日（第 2 版）  
2025 年 10 月 22 日（第 3 版）

医療機器届出番号：13B2X10121000163

歯科材料（09） 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

JDSロビンソンブラシ

【形状・構造および原理等】

形状	入数	品番
φ 15 mm #9	12 本	JR9012
φ 18 mm #11	12 本	JR1112

最大回転数：15,000rpm  
シャフト直径：2.35 mm  
原理：歯科技工用電気マイクロモーター等に装着して使用する。

- (保管方法および有効期間等)
- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷) および汚染を受けないように保管すること。
  - 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

(包装)  
12 本入

【使用目的、効果】  
補綴物等の研磨に用いる器材をいう。

【使用方法等】  
歯科用ハンドピースに装着し回転させ、補綴物にブラシ部を当てて研磨する。(レーズには使用できない)

- 【使用上の注意】
- ① ハンドピースメーカーの指示に従って、確実に機器へ装着しゆるんでないことを確認すること。
  - ② 使用前に予備回転を行い、異常が無いことを確認する。
  - ③ 中央部の壊れたもの、均一な形状でないものは、外れたりすることがあるので、無理な角度や過度の加圧での使用は避けること。
  - ④ 指定（製品の被包に記載）の最高許容回転速度（回転数）を超えて使用しないこと。
  - ⑤ 目の損傷を防ぐために、保護めがね等を使用すること。
  - ⑥ 変形、損傷（表面傷、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
  - ⑦ 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。

(製造販売業者および製造業者の氏名または名称等)  
アルゴファイルジャパン株式会社  
住所：〒101-0054  
東京都千代田区神田錦町一丁目 7 番地  
錦町一丁目ビル 3 階  
TEL：03-3233-1133  
FAX：03-3233-1129