

2017 年 12 月 18 日

医療機器届出番号:13B2X10121000165

器 25 医療用鏡

手術用電気機器及び関連装置 32692000

一般医療機器

マルチルーペ

【形状・構造および原理等】

形状：ヘッド型ルーペ及びアクリルレンズ



【保管方法および有効期間等】

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。

（包装）

1 セット入り 1 箱

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

アルゴフアイルジヤパン株式会社

【使用目的、効果】

作業野の拡大像を得る

【使用方法等】

作業時にレンズを覗き使用する

必要に応じてレンズを付け替え、倍率を変更する

【使用上の注意】

- ① レンズはふくらみのある側を外側に装着する
- ② レンズを通して太陽や光線の強いものを覗かない
- ③ レンズに傷が付かないように注意する
- ④ レンズをレンズケースにしまう際、向きをそろえてしまうこと
- ⑤ LED ライト部分を水に濡らさないこと
- ⑥ 衝撃、水分等にさらされることの無いよう注意すること

取扱説明書を必ず御参照ください。