

2018年3月16日

医療機器届出番号：13B2X10121000168

2025年10月22日（第2版）

歯科材料 9 歯科用研削材料

歯科用研磨器材 70907000

一般医療機器

ラスター

【形状・構造および原理等】

HOL2001

オレンジラスター



HBL2002

ブルーラスター



形状：棒状（許容誤差±10%）

【保管方法および有効期間等】

- 水分、腐食性及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）および汚染を受けないように保管すること。
- 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【包装】

1本

種類	色	粒度
HOL2001	オレンジ	#6000
HBL2002	ブルー	#8000

【製造販売業者および製造業者の氏名または名称等】

アルゴファイルジャパン株式会社

住所：〒101-0054

東京都千代田区神田錦町一丁目7番地

錦町一丁目ビル3階

TEL：03-3233-1133

FAX：03-3233-1129

【使用目的、効果】

本材は、歯科用電気エンジンやマイクロモーターに装着したブラシやフェルト等につけて歯科修復物を口腔外で研磨する際に使用する。

【使用方法等】

回転させたブラシやフェルト等に本材を付着させて、研磨を行う。

【使用上の注意】

- ① 眼の損傷を防ぐために、保護メガネ等を使用すること。
- ② 本材を使用して研削、研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスク等を使用すること。
- ③ 高速回転で使用すると本材が飛び散る恐れがあるので、10,000回転/分以下で使用する。
- ④ 研磨ブラシ等につ着させるとき、強く押し付けないこと。
- ⑤ 本材は口腔内で使用しないこと。

取扱説明書を必ず御参照ください。